


WICHTIG!

Wenn Ihre Behandlungsliege mit einem 3-teiligen Kopfteil ausgestattet ist, beachten Sie bitte den Punkt 6.3 in Ihrer Bedienungsanleitung.

Weiter ist unbedingt zu beachten:

Bevor Sie die Höhenverstellung der Behandlungsliege in Abwärtsstellung betätigen, müssen die Armablagen **UNBEDINGT** in die Neutralstellung (1) gebracht werden. Diese dürfen **NICHT** in einer unteren Stellung (2) verbleiben (falls vorher so eingestellt). Dazu müssen Sie die Armablagen an der Führungsstange (3) ganz nach oben schieben. Weiterhin ist **UNBEDINGT** darauf zu achten, daß sich die Armablage **NICHT** unter dem Kopfteil (4) befindet!

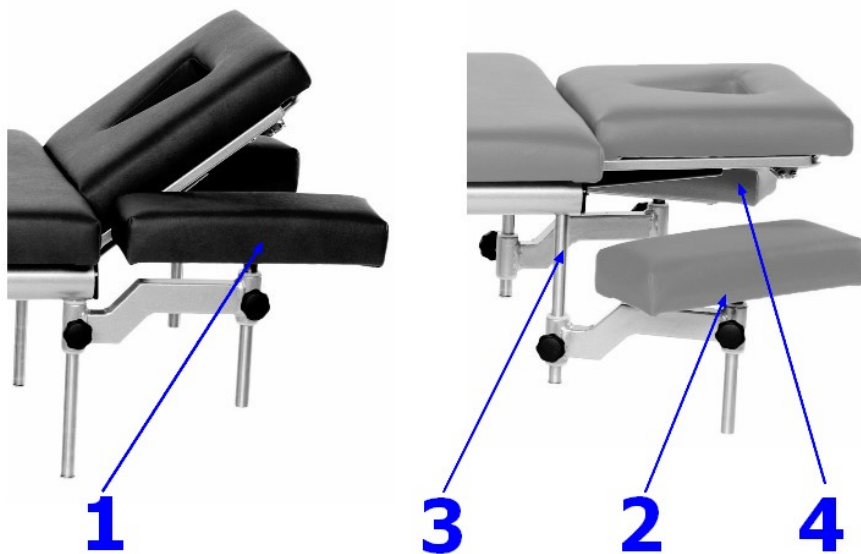

Bei Nichtbeachtung kann es zu Beschädigungen am Motor und Rahmen kommen für die wir keine Haftung übernehmen.

methatec Gesellschaft für Praxisbedarf mbH + Co., Handels KG

Gerlenhofer Straße 4

D-89233 Neu-Ulm

Tel.: +49 (0) 7307 – 97 55 -10

Fax: +49 (0) 7307 – 97 55 – 30

Mail: vertrieb@methatec.de

www.methatec.de